

Radiodermatite

A radiodermatite cobre o espectro das reações cutâneas causadas pela radioterapia ionizada e que pode afetar 95% dos pacientes submetidos à radioterapia.¹

As reações cutâneas durante a radioterapia podem prejudicar ainda mais a qualidade de vida dos pacientes com câncer, potencialmente prolongando ou interrompendo o tratamento.¹

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS PARA O PACIENTE¹:
Níveis elevados de dor, prurido, desconforto, fadiga, ...

Ferramenta de avaliação clínica RTOG²⁻³ e via de tratamento FlamiActiv[®] RT

O paciente inicia a radioterapia



PREVENÇÃO:

Aplique 3x/dia
A partir do dia 1



O paciente desenvolve uma reação cutânea



NÃO

RTOG 0

Continue a aplicação
3x/dia



SIM

- Eritema fraco ou opaco
- Leve tensionamento da pele
- Pode ocorrer coceira

RTOG 1

Aplique 3x/dia
Avalie semanalmente



- Eritema brilhante
- Descamação seca
- Pele dolorida, com coceira e tensionada

RTOG 2A

Aplique 3x/dia
Avalie semanalmente



- Descamação irregular e úmida
- Exsudato amarelo ou verde-pálido
- Edema e dor

RTOG 2B

Área limpa
Aplique Flaminal[®] Hydro +
absorvente não aderente
Avalie diariamente



Áreas de pele intacta podem ser tratadas com FlamiActiv[®] RT

- Descamação convergente e úmida
- Exsudato amarelo ou verde-pálido
- Edema e dor

RTOG 3

Área limpa
dependendo do nível de exsudato
Aplique Flaminal[®] Hydro,
Flaminal[®] Forte + curativo
absorvente não aderente
Avalie diariamente



Consulte a enfermeira de viabilidade de tecidos



Proteção da pele contra dermatite induzida por radioterapia com FlamiActiv® RT



FlamiActiv® RT

Clinicamente comprovado



ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

European Journal of Oncology Nursing

journal homepage: www.elsevier.com/locate/ejon



Efficacy of a hydroactive colloid gel versus historical controls for the prevention of radiotherapy-induced moist desquamation in breast cancer patients



Sandrine Censabella, PhD ^{a,*}, Stefan Claes, RN ^b, Marc Orlandini, MSc ^b,
Roel Braekers, PhD ^{c,d}, Paul Bulens, MD ^b

^a Jessa Hospital, Division of Medical Oncology, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt, Belgium


^b Limburg Oncology Centre, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt, Belgium

^c Interuniversity Institute for Biostatistics and Statistical Bioinformatics, Hasselt University, Agoralaan 1, B3590 Diepenbeek, Belgium


^d Catholic University of Leuven, Kapucijnenvoer 35, Blok D, Bus 7001, B3000 Leuven, Belgium

A aplicação de FlamiActiv[®] RT desde o início da radioterapia retarda o começo e reduz a incidência de descamação úmida⁴

Apenas 7% dos pacientes que utilizam Flamigel[®] desde o primeiro dia desenvolveram descamação úmida (RIMD), em comparação com 35% no grupo com dexpanthenol⁴

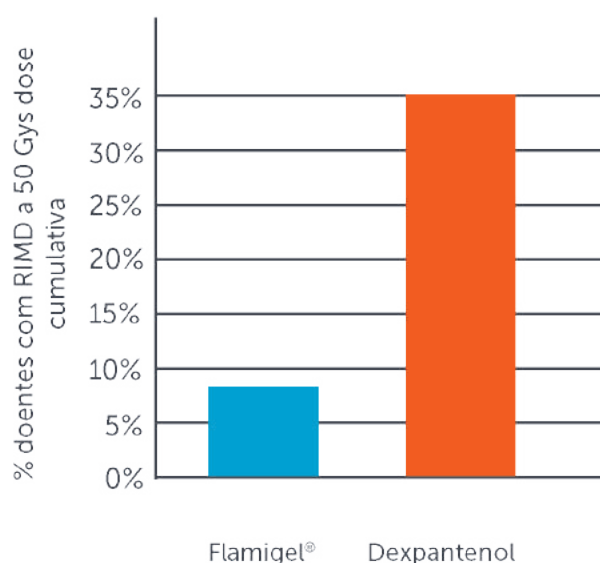

$p < 0,0001$

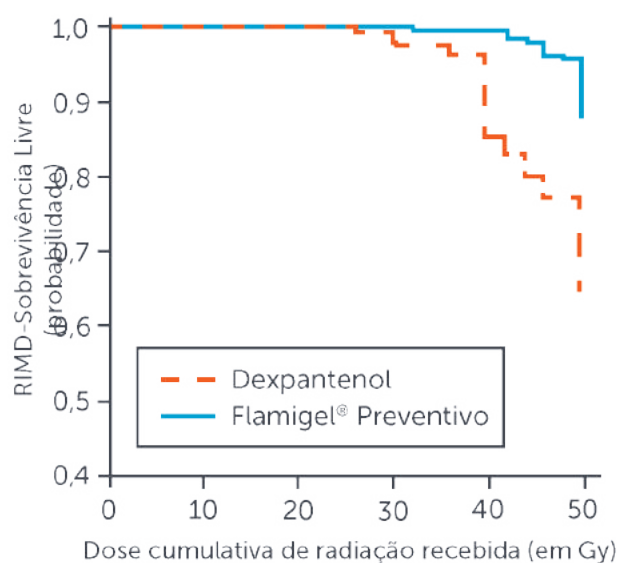

p (log rank) $< 0,0001$

Flamigel[®] preventivo: N=202

Dexpanthenol: N=131

o FlamiActiv® RT é um gel colóide hidroativo (não um hidratante/emoliente) que retarda o início e reduz a incidência de descamação úmida induzida pela radioterapia

O FlamiActiv® RT hidrata a área cutânea afetada e recupera o equilíbrio da umidade, reduz a intensidade dos sintomas


iniciais de reações cutâneas induzidas por radioterapia, como a pele vermelha, seca, com coceira, descamada ou irritada (descamação seca).

O FlamiActiv® RT retarda o início e reduz a incidência de descamação úmida induzida pela radioterapia (RIMD). Por conseguinte, ajuda a continuar o tratamento radioterápico prescrito, retardando o início e reduzindo a incidência de descamação úmida induzida pela radioterapia.

O FlamiActiv® RT ajuda a reduzir a dor, a vermelhidão e calor através do seu efeito refrescante, acalmando assim as áreas de pele exposta. O FlamiActiv® RT ajuda a criar condições ótimas de cura para acelerar a renovação celular, permitindo que a pele comprometida cicatrize rapidamente para assim reduzir a probabilidade de cicatrizes.

A eficácia de FlamiActiv® RT foi demonstrada em vários relatórios de casos e foi clinicamente comprovado.^{1,2}

Como funciona

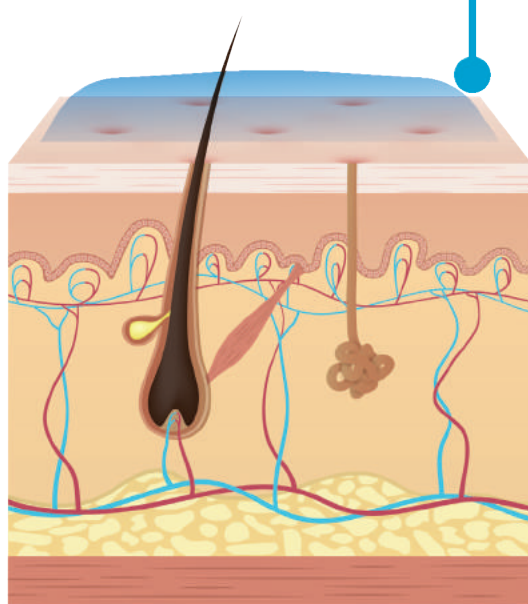

O FlamiActiv® RT forma uma barreira protetora sobre a epiderme

Proteção da Pele

Película Semipermeável⁹⁻¹¹

Fornecer uma barreira à volta das células afetadas que alivia os sintomas e protege contra a contaminação externa.

Reparação da Pele

Arginina

Cria condições ótimas de cura ao acelerar a renovação celular, permitindo que a pele comprometida cicatrize rapidamente, reduzindo assim a probabilidade de cicatrizes.

O FlamiActiv® RT fornece uma barreira protetora e apoia a regeneração da pele entre as sessões de radioterapia

Comprovado com casos reais


Estudo de caso⁸

Paciente tratado com 33 sessões de radioterapia para um carcinoma de boca.

Antes do tratamento com FlamiActiv® RT




Depois do tratamento com FlamiActiv® RT

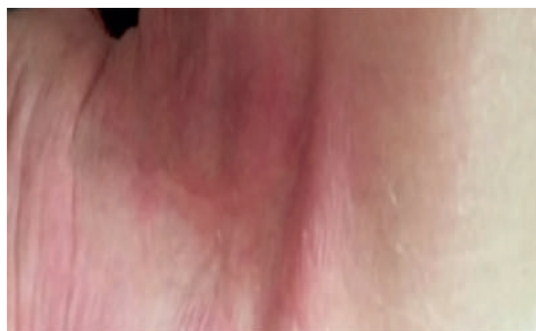

O FlamiActiv® RT cria condições ótimas de cura ao fornecer uma barreira contra a contaminação, hidratando a pele e reduzindo a dor

O FlamiActiv® RT acalma a área inflamada⁶

% total de respostas (n=106)

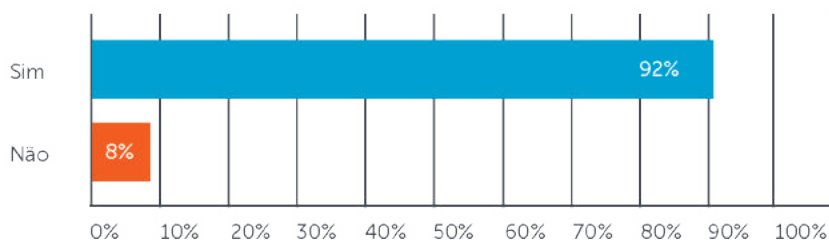

3 em cada 4 pacientes que utilizaram FlamiActiv® RT não desenvolveram a descamação úmida⁶

% total de respostas (n=162)

